

## 厚み4.5cmの薄型車いすクッション

αPLA® すくっとクッション

介護保険  
給付対象商品

車いす  
付属品




※車いすは販売しておりません。

対象者の目安


- 床ずれ発生リスクが軽度の方
- 車いす移動でクッションを利用する方
- 車いすに座って臀部に痛みを感じる方
- 体圧分散式マットレスに「アルファプラ すくっと Re」を利用している方
- 感染対策仕様のクッションが必要な方  
(クッションカバー:制菌加工 SEK赤ラベル)

### ■体圧分散性能比較

すくっとクッション

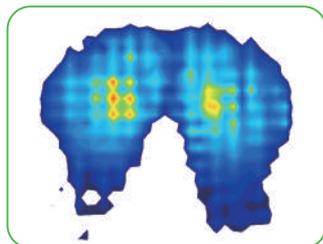

クッションなし

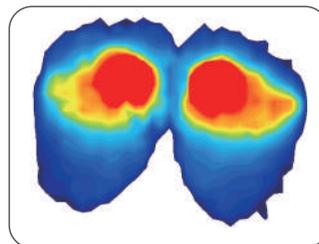

高  
↑  
圧力  
↓  
低

中材にウレタンフォームを使用することにより、臀部との接触面積を広げ、適度な体圧分散を行います。クッションを使用しない時と比べ、臀部の圧迫感が軽減されます。

## 安定感のある座り心地


臀部の形状に追従できる「特殊格子状ウレタンフォーム」により、安定した座り心地を実現します。



特殊格子状ウレタンフォーム

## 薄型、軽量でも底付きしにくい

中材には厚さ4.5cmと薄くて軽いウレタンフォームを使用していますが、座っても、底付きしにくい仕様です。

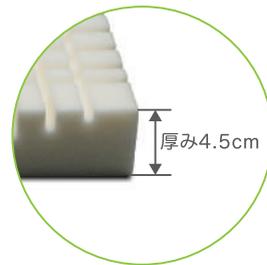

## 制菌加工カバー

制菌とは、有害細菌の増殖を抑制することです。アルファプラシリーズの車いすクッションは、一般社団法人繊維評価技術協議会が認証する制菌加工繊維製品である「SEK赤ラベル」を取得しています。（制菌加工繊維製品は感染対策の一つとして医療機関や介護施設で使用されています。）



### すくっとクッション

型番	SKTCA-4040
カラー	深緑
サイズ [cm]	幅40×長40×厚4.5
質量 [kg]	0.3
TAISコード	00563-000142
希望小売価格(税込)	12,100円

材質(カバー)：[天面・側面] ポリエステル [底面] ポリエステル/メタクリル樹脂  
材質(中身)：ポリウレタンフォーム

### 取扱上の注意

- 本製品のご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、すぐに使用をやめ、専門家に相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。
- ご自身で身体を支えられない方は、必ず第三者の立ち会いのもとご使用ください。クッションから転倒・転落する恐れがあります。
- 移乗などでやむを得ずクッションの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。クッションから転倒・転落する恐れがあります。

### お手入れ方法

#### ■ウレタンフォーム

●ウレタンフォームを洗浄する際は、以下の注意事項をお守りください。

- ・家庭用洗濯機、乾燥機は使用できません。
- ・汚れがひどい場合は、水洗いが可能です。その際は、液温40℃を限度とし、中性洗剤を使用して、手洗い(押し洗い)してください。乾いたタオルなどで水分を拭き取った後、直射日光を避け、日陰で平らに置いて十分乾燥させてください。
- ・軽い汚れの場合には、乾いたタオルもしくは固く絞ったぬれタオルでたたくようにして拭いた後、乾燥させてください。
- ・カバーはウレタンフォームの形に合せて向きがあります。カバーを装着する際は、前後、上下をお確かめください。
- ・市販のアルコールや除菌消臭剤はウレタンフォームの劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。
- ・定期的に風通しのよい日陰で平らに置いて乾燥させてください。

※カバーからウレタンフォームを取り出す際は、向きをご確認ください。

- 製品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。
- PLA**、すくっとは(株)タイカの登録商標です。

#### ■カバー

●本製品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項をお守りください。

	洗濯機による洗濯が可能です。液温40℃を限度とし、カバーを洗濯用ネットに入れ、弱水流で洗ってください。		直射日光は避け、日陰で吊るして乾燥させてください。
	酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。		アイロン掛けはできません。
	タンブル乾燥は使用できません。		ドライクリーニングはできません。
	ウェットクリーニングはできません。		

# Taica Wellness

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4  
TEL:03-5648-6630 FAX:03-5648-6640

フリーダイヤル ☎ 0120-152047

ホームページ <https://taica.co.jp/pla/>

