




アルファプラ すくっとクッション

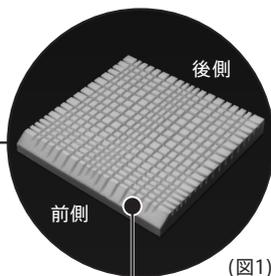

特殊格子状
ウレタンフォーム

(図1)

① 安全上の注意

安心してご使用いただくために、本書をよくお読みいただき、使用方法を必ず守ってご使用ください。



以下の記載を無視して、誤った取り扱いをすると、人命に関わるけがや重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品のご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は、すぐに使用を止め、専門家に相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。
- ご自身で身体を支えられない方は、必ず第三者の立ち会いのもとご使用ください。
- クッションから転倒・転落する恐れがあります。
- 移乗などでやむを得ずクッションの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。クッションから転倒・転落する恐れがあります。

② 取扱上の注意

- 「αPLA すくっと」とプリントしてある面を上にしてご使用ください。上下を間違えますと、効果的な体圧分散ができず、床ずれを発生および悪化させる恐れがあります。底面には滑り止め加工が施してあり、品質表示タグがあります。
- 前後をお確かめのうえ、ご使用ください。前後を間違えますと、効果的な体圧分散ができず、床ずれを発生および悪化させる恐れがあります。前側はウレタンフォームが斜めにカットされており(図1)、後側にはファスナーと品質表示タグが取り付けられています。
- クッションの深い位置で座るようにしてください。前面にずれた状態で座りますと、十分な効果を発揮しません。
- 針、ピン等の突起物により、カバーやウレタンフォームに穴を開けたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- クッション丸ごと(カバーを付けたままの状態)の洗濯は避けてください。必ずカバーとウレタンフォームは分けて洗濯してください。洗濯方法は、本書のお手入れ方法をご確認のうえ、正しく行ってください。
- 直射日光に当たらないようにしてください。紫外線による変質の原因になります。
- 高温のもの(ドライヤー、ストーブ、アイロン等)および低温のもの(ドライアイス等)に近づけないでください。変質の原因になります。
- 無理な力(折り曲げる、強くにぎる、引っ張る、ねじる等)を加えると、破損の原因になります。
- カバーは、通気性に優れた蒸れにくい素材を使っているため、食べこぼしや失禁などの水分は、中身のウレタンフォームに浸透しますのでご注意ください。

③ ご使用になる前に

- お手元に製品が届きましたら、速やかに製品をご確認ください。
- ご使用前にキス、ほころび、汚れ等がないことを、必ずご確認ください。厳重な品質管理のもと製造しておりますが、万が一不備がありましたら、お手数ですが、(株)タイカまでご連絡ください。
- 開封直後、ウレタンフォームの臭いが気になる場合がありますが、身体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。臭いはしばらくすると自然に消えますのでご安心ください。

4 使用方法

●「αPLA すくっと」のロゴプリント面を上に向けてご使用ください。



5 お手入れ方法

【カバー】

●本製品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項をお守りください。

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | 洗濯機によるお洗濯が可能です。液温40℃を限度とし、カバーを洗濯用ネットに入れ、弱水流で洗ってください。 | | 日陰で吊るして乾燥してください。 |
| | 酸素系漂白剤は使用できませんが、塩素系漂白剤は使用できません。 | | アイロン掛けはできません。 |
| | タンブル乾燥はできません。 | | ドライクリーニングはできません。 |
| | ウェットクリーニングはできません。 | | |

【ウレタンフォーム】

●ウレタンフォームを洗浄する際は、以下の注意事項をお守りください。

- ・家庭用洗濯機、乾燥機は使用できません。
 - ・汚れがひどい場合は、水洗いが可能です。その際は、液温40℃を限度とし、中性洗剤を使用して、手洗い(押し洗い)してください。乾いたタオルなどで水分を拭き取った後、直射日光を避け、日陰で平らに置いて十分乾燥させてください。
 - ・軽い汚れの場合には、乾いたタオルもしくは固く絞ったぬれタオルでたたくようにして拭いた後、乾燥させてください。
 - ・カバーはウレタンフォームの形に合わせて向きがあります。カバーを装着する際は、前後、上下をお確かめください。
 - ・市販のアルコールや除菌消臭剤はウレタンフォームの劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。
 - ・定期的に風通しのよい日陰で平らに置いて乾燥させてください。
- ※カバーからウレタンフォームを取り出す際は、向きをご確認ください。

6 保管方法

- 保管する際は、劣化を防ぐため汚れを落とし、平らに置くようにしてください。
- 変形防止のため、製品の上に物を載せないでください。
- 高温・多湿や直射日光の当たる場所は避けてください。

7 仕様

| | | |
|-----|-----|------------------------------------|
| | | 通気カバータイプ |
| 型番 | | SKTCA-4040 |
| カラー | | 深緑 |
| サイズ | | 幅40×長40×厚4.5(cm) |
| 質量 | | 0.3(kg) |
| 材質 | カバー | [天面・側面] ポリエステル [底面] ポリエステル/メタクリル樹脂 |
| | 中身 | ポリウレタンフォーム |

αPLA、すくっとは(株)タイカの登録商標です。

製品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。

Taica

株式会社タイカ ウエルネス事業本部
〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
Tel.03-5648-6630 Fax.03-5648-6640
☎0120-152047(無料)