

商 品 仕 様

- 素材
側 地／ポリエステル100% 詰め物／ウレタンフォーム、ナイロン
- 種類、サイズ、重量

種 類	サイズ	重量
ジャンボ	約73cm×73cm	約2,400g
ピロー	約30cm×80cm	約800g
ウェーブ	約65cm×75cm	約1,100g
ウェーブ(ロング)	約75cm×80cm	約1,500g
プーメラン(大)	約50cm×90cm	約1,300g
プーメラン(小)	約44cm×74cm	約800g
ビーン	約27cm×48cm	約300g
スティック(大)	約20cm×60cm	約450g
スティック(小)	約40cm×20cm	約300g
ミニ	約30cm×50cm	約400g

お手入れの方法

本商品は丸洗いでできます。お洗濯の際は下記の洗濯方法をお守りください。

	60℃以下の液温で、洗濯機で洗濯できます。
	酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用できません。
	アイロン掛けは出来ません。
	ドライクリーニングは出来ません。
	ウェットクリーニングはできません。
乾燥	100℃以下の設定で乾燥機をご使用ください。

- 汚れが気になる場合は、別売の専用カバーのご利用をお勧めします。
- 自然乾燥は十分な乾燥ができないため、かび発生等の原因になりますのでおやめください。
- アルコールを含む除菌消臭剤は、詰め物の劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。
- 定期的に風通しの良い日陰で乾燥させることをお勧めします。

2018.02.2000

Taica

株式会社タイカ ウエルネス事業本部
〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
Tel:03-5648-6630 Fax:03-5648-6640

ポジショニングクッション



取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

安心してご使用いただくために

安心してご使用いただくために、以下のことを必ず守ってご使用ください。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

本商品を顔にかぶせたり、口にいれたりしないでください。
窒息する恐れがあります。

人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

詰め物を取りださないでください。

火または温度の高いものに近づけないでください。
火災の危険があります。

高温のもの(ドライヤー、ストーブ、アイロン等)および低温のもの(ドライアイス等)に近づけないでください。変質の原因になります。

はさみやナイフ、カッターなど鋭利なものを近づけないでください。
破損の原因になります。

無理な力(力強く握る、強く引っ張る、強くねじる等)を加えないでください。破損の原因になります。

直射日光に当たないようにしてください。変質の原因になります。

ご使用になる前に

- お手元に商品が届きましたら、速やかに商品をご確認ください。
- ご使用前に傷、ほころび、汚れ等がないことを、必ずご確認ください。
 厳重な管理のもと製造しておりますが、万が一不備がありましたら、
 お手数ですが、(株)タイカまたは取扱店にご連絡ください。
- 詰め物が片寄っている場合がありますので、形をならしてからご使用ください。
- 開封直後、詰め物(ウレタンフォーム)の臭いが気になる場合がありますが、身体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。


ポジショニングクッション ウェルピー HC のご使用方法

- 1.ウェルピーHCは、体位変換、体圧分散、緊張緩和に適したクッションです。
 - ・体位変換：一定の姿勢に変換し、安楽に保つことを可能にします。
 - ・体圧分散：広い面積で体重を支えることを可能にします。
 - ・緊張緩和：重力に逆らわない自然な姿勢を可能にします。
- 2.ウェルピーHCは、豊富な種類でさまざまな状況に対応します。
組み合わせてご使用になると、より理想的な環境をつくり出せます。使用例をご参考ください。
- 3.医療、介護向けの場合は、作業療法士や理学療法士、看護師などの指導を受けてご使用になることをお勧めします。


ポケットの使い方

ウェルピーHCには、体位変換やポジショニングの際に便利なポケットが付いています。

■体位変換【ブーメラン（大）の例】
頭部から肩に使用した場合

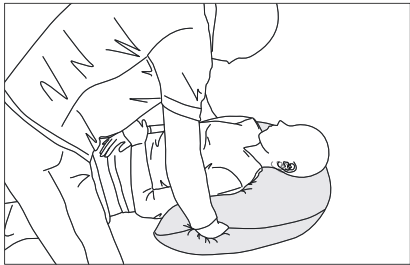


■ポジショニング【ジャンボの例】
詰め物の位置調整

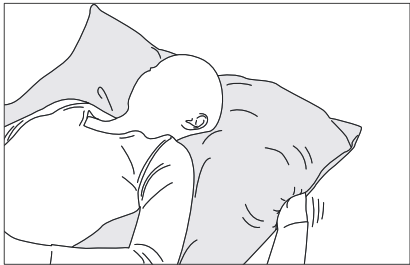


使用例


■ ブーメラン（大）

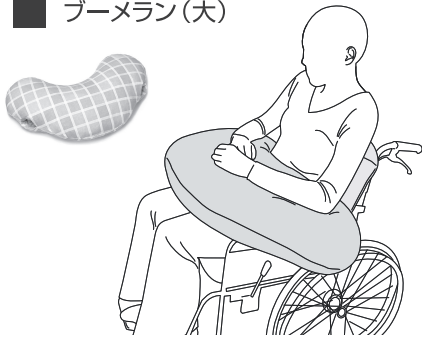

■ ブーメラン（大）

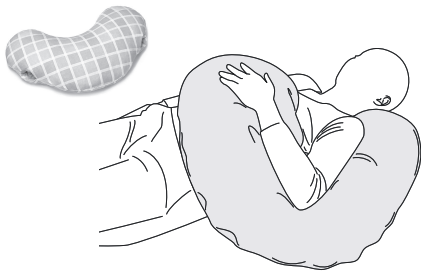

■ ピロー

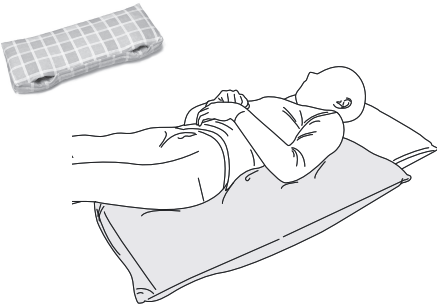


■ ジャンボ




■ ピロー




■ ウェーブ

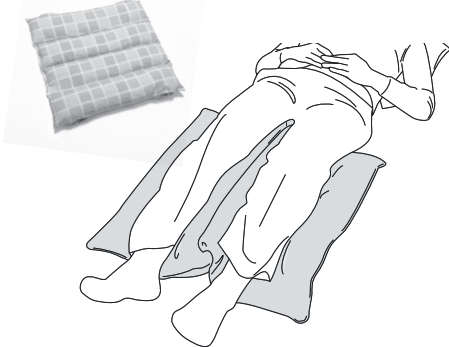


■ スティック（小）2個

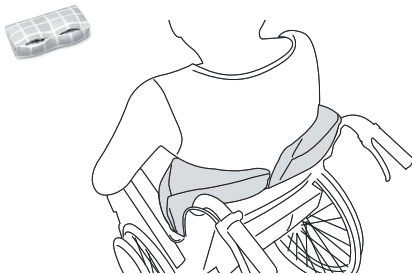

■ ブーメラン（大）&ミニ

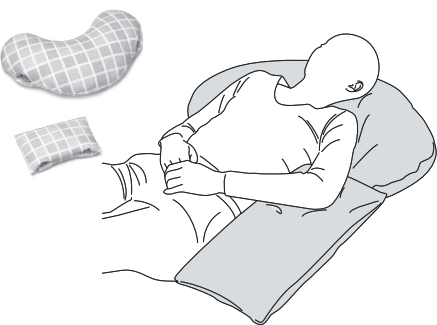

■ スティック（大）2個&スティック（小）

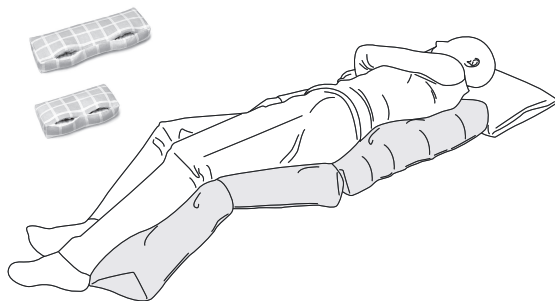

■ ジャンボ&ブーメラン（小）&ウェーブ&ピロー&スティック（大）

